

Anwendung des Rolenium® Elpenhaler® der neuen Generation



Öffnen Sie das Aufbewahrungsfach durch Drücken der unteren weißen Taste auf der Vorderseite des Inhaliergerätes (Rolenium® Elpenhaler®).

Entnehmen Sie einen Blisterstreifen und schließen Sie das Aufbewahrungsfach wieder.



Öffnen Sie die transparente Schutzkappe des Inhalators an der geriffelten Fläche.

Entsperren Sie das Mundstück mit leichtem Druck und klappen Sie es nach hinten, um die Arzneimittelauflagefläche freizulegen.



Halten Sie den Blisterstreifen mit der blauen Linie nach oben und fixieren Sie das Loch im Blisterstreifen auf dem Befestigungspunkt der Auflagefläche. Drücken Sie leicht auf den Blisterstreifen, um sicherzustellen, dass der Streifen fest am Befestigungspunkt sitzt.

Die Nöpfchen des Blisterstreifens passen in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Auflagefläche und die Führungsstege stellen sicher, dass der Blisterstreifen richtig eingelegt ist.




Schließen Sie nun das Mundstück und ziehen Sie das überstehende Ende des Blisterstreifens in waagerechter Richtung heraus.

Die Dosis kann nun inhaliert werden.

Bitte setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin.



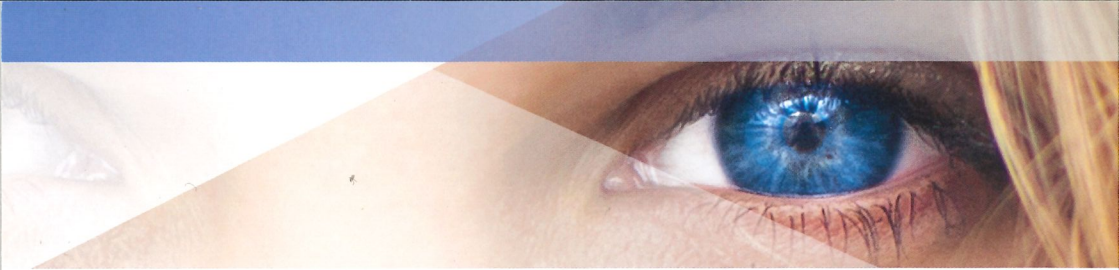

5



Halten Sie den Rolenium® Elpenhaler® von Ihrem Mund entfernt. Atmen Sie aus, nicht jedoch in das Inhalationsgerät hinein.

Setzen Sie das Mundstück an Ihren Mund und umschließen Sie es dicht mit Ihren Lippen.

Atmen Sie kräftig, gleichmäßig und tief durch das Inhalationsgerät ein.

Nehmen Sie das Inhalationsgerät von Ihrem Mund.

Halten Sie Ihren Atem etwa 5–10 Sekunden oder so lange an, wie es Ihnen möglich ist.

6



Atmen Sie langsam aus, nicht jedoch in das Mundstück. Atmen Sie anschließend normal weiter.

Öffnen Sie das Mundstück. Wenn das gesamte Pulver inhaliert wurde, sind die Näpfchen des Blisterstreifens leer. Entfernen Sie den leeren Blisterstreifen.

Schließen Sie das Mundstück und die Schutzkappe wieder.

Spülen Sie Ihren Mund nach der Inhalation mit Wasser und spucken Sie es aus oder putzen Sie Ihre Zähne. Dies kann das Auftreten von Soorbefall und Heiserkeit verhindern helfen.

Reinigen Sie den Rolenium® Elpenhaler® nach jeder Inhalation mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser.



Packungsbeilage beachten.



ELPEN Pharma GmbH · Bismarckstraße 63 · 12169 Berlin-Steglitz
info@elpen-pharma.de · www.elpen-pharma.de · Tel.: +49 (0) 30 7974 040-0
Fax: +49 (0) 30 7974 040-17



elpenhaler.de

Mat. Nr.: RW 020219